

Houdbaarheid van gesteriliseerde instrumenten

Gesteriliseerd kritisch instrumentarium en andere kritische materialen blijven steriel zolang de verpakking droog en onbeschadigd en niet te oud is. In te volle lades is het risico op beschadiging van verpakkingen groot. De houdbaarheid van de steriliteit is afhankelijk van verschillende factoren, zoals het type verpakkingsmateriaal en de manier van verpakken, transport, opslagmiddelen en opslagplaats.

Gesteriliseerd kritisch instrumentarium dat verpakt in laminaatzakjes wordt bewaard, is één maand houdbaar. De houdbaarheid kan worden verlengd tot zes maanden als deze verpakking in een gesloten bak wordt bewaard. (Gebruik van een tweede laminaatlaag om de bewaartermijn te verlengen, is niet handig, want de meeste autoclaven steriliseren dan onvoldoende.)